

Link do produktu: <https://grasse24.pl/akuku-termofoz-z-pestkami-wisni-w-pokrowcu-13x16-cm-bez-a0635-p-143411.html>



AKUKU Termofoz z pestkami wiśni w pokrowcu 13x16 cm bez (a0635)

Cena brutto	32,50 zł
Cena netto	26,42 zł
Numer katalogowy	337823128
Kod producenta	168904
Kod EAN	5905317670500

Opis produktu

Termofoz z pestkami wiśni - WYRÓB MEDYCZNY

Termofoz wykonany jest z odpowiednio dobranych i osuszonych pestek wiśni. Jest w 100% bezpieczny i przyjazny dla dziecka.

Produkt ten nie posiada płynów które mogą się rozlać. Po podgrzaniu utrzymuje temperaturę do 1 godziny. Naturalnie oddaje ciepło co eliminuje możliwość poparzenia i uszkodzenia skóry.

Kształt idealnie nadaje się na małe brzuszki.

WAŻNE: Zdejmowany pokrowiec, który można wyprać.

Zastosowanie termofozu na gorąco:

- kolki noworodkowe, wzdęcia
- rwa kulszowa
- bóle mięśni
- bóle menstruacyjne

Zastosowanie termofozu na zimno:

- ugryzienia owadów
- gorączka
- siniaki, guzy,
- migrena

Sposób użycia:

- Grzanie :

Termofoz umieścić w kuchence mikrofalowej (600 W / około 90 sekund), piekarniku (130 °/ około 10 min.) lub na innym

źródle ciepła np. grzejnik. NIGDY NIE GRZEJ WKŁADU Z POKROWCEM.

UWAGA – nie stosuj rozgrzanego termoforu na choroby serca, żył, ostrych stanów zapalnych.

Po nagrzaniu się termoforu wymieszaj pestki i sprawdź temperaturę na nadgarstku.

- Na zimno :

Włożyć termofor z pokrowcem do zamrażalnika na około 60 min lub do lodówki na około 2 godziny.

Pamiętaj aby zabezpieczyć go przed kontaktem z żywnością.

Pokrowiec można prać ręcznie, lub w pralce w temp 30° NIGDY NIE PIERZ WKŁADU Z PESTKAMI.

Produkt nie jest zabawka – zawiera małe elementy które dziecko może połknąć.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy produkt nie posiada uszkodzeń. W przypadku zużycia/zabrudzenia wkładu wymień go na nowy