

Link do produktu: <https://grasse24.pl/compeed-plastry-na-pecherze-na-pietach-dla-kobiet-srednie-1op-5szt-p-132317.html>



COMPEED Plastry na pęcherze na piętach dla kobiet - średnie 1op.- 5szt

Cena brutto	34,00 zł
Cena netto	27,64 zł
Numer katalogowy	141931
Kod producenta	141931
Kod EAN	3574661047546

Opis produktu

Plastry na pęcherze Compeed® zostały zaprojektowane tak, aby chroniły pęcherz i tworzyły optymalne środowisko sprzyjające procesowi gojenia. Zapewniają natychmiastową ulgę w bólu i głęboką amortyzację.

COMPEED® Plaster na pęcherze dla kobiet noszących buty na wysokich obcasach wykorzystuje zaawansowaną technologię hydrokoloidową, dając natychmiastową ulgę od bólu i szybsze gojenie. Unikalne wyprofilowanie w kształcie motyla i przezroczyste krawędzie zapewniają dokładne dopasowanie do kształtu pięty, a tym samym najwyższą dyskrecję. Plastry Compeed® przyspieszają gojenie są odpowiednie do stosowania na wszystkie pęcherze powstałe wskutek noszenia obuwia na wysokim obcasie.

Rozmiar plastra: 4.2cmx6.8cm

Cechy:

- Unikalne wyprofilowanie w kształcie motyla i przezroczyste krawędzie zapewniają dopasowanie plastra do kształtu pięty, a tym samym pełną dyskrecję.

- Gruba warstwa amortyzująca zmniejsza nacisk i pozwala uniknąć bolesnego obcierania.

- Ultraprzylepne, wymodelowane krawędzie sprawiają, że plaster Compeed dopasowuje się do ruchów i pozostaje na miejscu przez kilka dni.

Sposób użycia:

Oczyść i osusz skórę przed użyciem. Miejsce z pęcherzem nie może być tłuste od kremów czy olejków. Usuń warstwę papierową plastra, unikając dotykania warstwy samoprzylepnej. Przyklej plaster pewnym ruchem tak, aby zasłaniał pęcherz. Wygładź brzegi plastra. Pozostaw plaster na miejscu do czasu, aż sam zacznie się odklejać (uwaga: plaster może pozostawać na miejscu do kilku dni). Aby usunąć plaster: nie pociągaj do góry, tylko powoli rozciągnij na skórze.