

Link do produktu: <https://grasse24.pl/corega-power-max-krem-do-mocowania-protez-zebowych-max-mocowanie-swiezosc-40-g-p-141233.html>



COREGA Power Max Krem do mocowania protez zębowych Max Mocowanie + Świeżość 40 g

Cena brutto	23,50 zł
Cena netto	19,11 zł
Numer katalogowy	309071172
Kod producenta	147031
Kod EAN	5054563123558

Opis produktu

Corega Max Mocowanie + Świeżość krem do protez zębowych 40g

Cechy:

MAX MOCOWANIE: Najsilniejsze Mocowanie* dla Twojej protezy – odpowiednie dla protez całościowych i częściowych. Teraz możesz jeść wszystko, co tylko zechcesz! *w portfolio kremów do protez Corega

DŁUGOTRWAŁA ŚWIEŻOŚĆ: Krem mocujący Corega aromatyzowany jest olejkami mięty pieprzowej, mięty zielonej i naturalnym olejkiem bazyliowym, który nadaje odświeżający smak.

PRECYZYJNA APLIKACJA: Specjalna końcówka umożliwia precyzyjne i równomierne nakładanie odpowiedniej ilości produktu.

NIE OBAWIAJ SIĘ JEDZENIA: Klinicznie udowodnione udoskonalone mocowanie przez 12 godzin. Zapewnia większą szczelność i komfort**, dzięki czemu możesz cieszyć się z jedzenia bez ograniczeń. **w porównaniu do braku stosowania kremu mocującego do protez zębowych

BEZ CYNKU: Ten krem mocujący do protez zębowych Corega nie zawiera cynku.

MARKA NR 1 W PIELĘGNACJI PROTEZ ZĘBOWYCH NA ŚWIECIE * **** Wartość w cenach detalicznych dla produktów GSK z Kategorii Produktów do Pielęgnacji Protez Zębowych, dane za okres październik 2021 - wrzesień 2022

SZCZEGÓŁY PRODUKTU: Tubka z precyzyjną końcówką zawiera 40 g kremu mocującego do protez zębowych. Krem ma różowy kolor i miętowy smak. Karton jest wykonany z materiału pochodzącego z recyklingu i nadaje się do recyklingu.

Poczuj swobodę delektowania się ulubionymi potrawami. Corega Max Mocowanie + Świeżość zapewnia najsilniejsze mocowanie*. Krem mocujący Corega o smaku miętowym jest aromatyzowany olejkami mięty pieprzowej, mięty zielonej i naturalnym olejkiem bazyliowym, który nadaje odświeżający smak. Ciesz się odczuciem świeżości – możesz zachować spokój i mieć pewność, że możesz być blisko przyjaciół i rodziny. Zapewnia mocowanie protezy do 12 godzin, a precyzyjna końcówka aplikatora pomaga nałożyć dokładnie odpowiednią ilość kremu. Ciesz się wolnością wyboru każdego rodzaju jedzenia i przekąsek, takich jak orzechy, nasiona lub popcorn, bez obaw o przedostawanie się drobinek jedzenia pod protezę i delektuj się każdym kęsem. Kremy do protez mogą również poprawić komfort noszenia protezy. Ponadto Corega Max Mocowanie + Świeżość nie zawiera cynku.

Sposób aplikacji kremu:

-
1. Protezę należy umyć i wysuszyć.
 2. Nanosić krótkie paski kremu na protezę w sposób pokazany na rysunku na opakowaniu, niezbyt blisko jej krawędzi.
 - a. Proteza górna: Nakładać długim ciągłym paskiem. Nałożyć 2 krótsze paski na środku protezy
 - b. Proteza dolna: Produkt nakładać długim ciągłym paskiem.
 - c. Proteza częściowa: Nałożyć 2 krótkie paski
 3. Wypłukać jamę ustną przed założeniem protezy.
 4. Założyć protezę, docisnąć ją i przygryźć na kilka sekund dla bezpiecznego trzymania.

Sposób usuwania:

1. Przepłukać jamę ustną wodą.
2. Wyjmować protezę powoli jednocześnie nią poruszając.
3. Usunąć resztki kremu z protezy i jamy ustnej za pomocą ciepłej wody i miękkiej szczoteczki.
- 4.żyć tabletki do czyszczenia protez Corega zgodnie z instrukcją, aby dokładnie wyczyścić protezę.

*w portfolio kremów do protez Corega

Skład(INCI):

kopolimer wapniowo-sodowy PVM / MA (30 %)

wazelina

guma celulozowa (24 %)

parafina płynna

aromat

alkohol benzylowy