

Link do produktu: <https://grasse24.pl/corega-power-max-krem-mocujacy-do-protez-zebowych-max-mocowanieoslona-mietowy-40g-p-134772.html>



COREGA Power Max Krem mocujący do protez zębowych Max Mocowanie+Osłona - miętowy 40g

Cena brutto	23,50 zł
Cena netto	19,11 zł
Numer katalogowy	153179
Kod producenta	153179
Kod EAN	5054563121561

Opis produktu

COREGA MAX MOCOWANIE+OSŁONA MIĘTOWY 40 G

Poczuj swobodę delectowania się ulubionymi potrawami. Corega Max Mocowanie + Osłona Miętowy zapewnia najsilniejsze mocowanie* oraz blokuje do 5x więcej drobinek jedzenia** przedostających się pod protezę podczas jedzenia. Zapewnia mocowanie do 12 godzin, a precyzyjna końcówka aplikatora pomaga nałożyć dokładnie odpowiednią ilość. Ciesz się wolnością wyboru każdego rodzaju jedzenia i przekąsek, takich jak orzechy, nasiona lub popcorn i delektuj się każdym kęsem. Kremy do protez mogą również poprawić komfort noszenia protezy. Ponadto Corega Max Mocowanie + Osłona Miętowy nie zawiera cynku ani dodatkowych sztucznych barwników i od teraz występuje w nowym wariantcie smakowym: Miętowy. Ciesz się życiem bez zmartwień o protezę.

Sposób aplikacji kremu:

1. Protezę należy umyć i wysuszyć.
2. Nanosić krótkie paski kremu na protezę w sposób pokazany na rysunku na opakowaniu, niezbyt blisko jej krawędzi.
 - a. Proteza górna: Nakładać długim ciągłym paskiem. Nałożyć 2 krótsze paski na środku protezy
 - b. Proteza dolna: Produkt nakładać długim ciągłym paskiem.
 - c. Proteza częściowa: Nałożyć 2 krótkie paski
3. Wyplukać jamę ustną przed założeniem protezy.
4. Założyć protezę, docisnąć ją i przygryźć na kilka sekund dla bezpiecznego trzymania.

Sposób usuwania:

1. Przeplukać jamę ustną wodą.
2. Wyjmować protezę powoli jednocześnie nią poruszając.
3. Usunąć resztki kremu z protezy i jamy ustnej za pomocą ciepłej wody i miękkiej szczoteczki.
4. Użyć tabletki do czyszczenia protez Corega zgodnie z instrukcją, aby dokładnie wyczyścić protezę.

*w portfolio kremów do protez Corega

**w porównaniu do braku stosowania kremu mocującego do protez zębowych

Corega oferuje produkty do pielęgnacji protez zębowych przeznaczone do mocowania i podnoszenia komfortu użytkowania protez i poprawy stanu zdrowia jamy ustnej użytkowników protez całkowitych oraz częściowych.

Gama kremów mocujących do protez zębowych Corega ma za zadanie poprawić komfort użytkowania Twojej protezy zębowej, dzięki czemu będziesz mógł bez obaw cieszyć się życiem.

Instrukcja stosowania:

Przy pierwszym użyciu należy zastosować niewielką ilość kremu do protez. W razie potrzeby następnym razem należy nałożyć większą ilość kremu. Użycie zbyt dużej ilości może spowodować jego wypływanie. W takiej sytuacji następnym razem należy zastosować mniejszą ilość kremu. Konieczne może być przeprowadzenie kilku prób w celu określenia odpowiedniej ilości kremu dla danej protezy. Stosować raz dziennie dla mocnego całodziennego trzymania i osłony dla przedostających się drobinek jedzenia. Jeśli konieczne jest stosowanie częściej niż raz dziennie, należy skonsultować się z lekarzem.

Skład(INCI):

kopolimer wapniowo-sodowy PVM/MA

wazelina

guma celulozowa

parafina płynna

aromat

CI 73360

CI 15850