

Link do produktu: <https://grasse24.pl/salvequick-med-blister-rescue-plastery-na-pecherze-360-protective-care-1op-5szt-p-129530.html>



Salvequick Med Blister Rescue Plastery na pęcherze 360 Protective Care 1op.-5szt

Cena brutto	22,00 zł
Cena netto	17,89 zł
Numer katalogowy	135746
Kod producenta	135746
Kod EAN	7310610016173

Opis produktu

Blister Rescue to plaster na pęcherze z innowacyjnymi hydrożelowymi opartunkami!

Wszyscy znamy to bolesne uczucie, gdy pojawił się pęcherz. Wreszcie, istnieje innowacyjny sposób leczenia pęcherzy, dzięki nowemu plasterowi Blister Rescue.

Zapewnia pełną 360° ochronę:

- Jest transparentny i elastyczny
 - Dobrze utrzymują się na miejscu
 - Chroni powierzchnię skóry w miejscu pęcherzy i przynosi ulgę w ucisku
 - Łatwy i bezbolesny do usunięcia
- Wypróbuj nowy sposób leczenia pęcherzy

Plastry z technologią hydrożelową, które nie przyklejają się do pęcherza
Krawędź plastra wykonana z folii poliuretanowej o silnej adhezji

Blister Rescue jest najlepszym rozwiązaniem, w przypadku przebitych lub nieprzebitych pęcherzy. Dzięki mniejszej przyczepności hydrożelowych opatrunków plaster na pęcherze jest łatwy do usunięcia bez naruszania gojącej się rany. Niezawodnie utrzymuje się na miejscu, dzięki silnej przyczepności krawędzi folii PU.

Osoby z zaburzeniami gojenia się ran, np. diabetycy oraz osoby starsze, powinny regularnie sprawdzać stan gojącego się pęcherza.

Nie używać na pęcherze wypełnione krwią, pęcherze głębokie, silnie krwawiące lub zakażone.

Pozostaw plaster do czasu, aż sam się odklei, jednak nie dłużej niż pięć dni. Plaster na pęcherze może pozostać na skórze przez kilka dni, w zależności warunków stosowania.

Zapoznaj się z ulotką, która zawiera dodatkowe informacje.

Sposób użycia::

1. Oczyszczyć i osuszyć skórę przed użyciem plastra.
2. Rozewrzeć ochronną torebkę z plastrem i usunąć papier ochronny z plastra.
3. Przyłożyć plaster pośrodku pęcherza.
4. Usunąć górną warstwę ochronną z tworzywa sztucznego.